

Acetocaustin®

Warzen Stift

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN ACETOCAUSTIN WARZEN STIFT VERWENDEN, AUCH WENN SIE DAS PRODUKT SCHON EINMAL BENUTZT HABEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. FÜR ERWACHSENE UND KINDER (AB 4 JAHREN)

WOFÜR WIRD DER ACETOCAUSTIN WARZEN STIFT VERWENDET? Der Acetocaustin Warzen Stift ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen an Händen und Füßen. Der Acetocaustin Warzen Stift enthält Monochloressigsäure, eine Substanz, die eine keratolytische Wirkung auf die Haut hat. Sie löst die Warze Schicht für Schicht auf. Die Monochloressigsäure zerstört die Zellen, die das Warzenvirus enthalten.

Der Acetocaustin Warzen Stift hat den Vorteil, dass die Anwendung direkt auf der Warze nicht schmerzt. Damit ist er auch für Kinder geeignet, sofern er von einem Erwachsenen korrekt angewendet wird.

Der Acetocaustin Warzen Stift kann nur bei gewöhnlichen Warzen verwendet werden. Ihre Merkmale sind:

- Auftreten vor allem an Händen und Füßen
- Gleiche Farbe wie die Haut
- Der Umfang variiert von weniger als einem Millimeter bis zu mehr als einem Zentimeter
- Meist bilden sich mehrere Warzen gleichzeitig
- Die Ansteckung erfolgt häufig durch direkten Kontakt, aber auch durch Handtücher oder infizierte Oberflächen
- Kratzen und Nägelkauen erhöhen das Risiko einer Ansteckung



Den Acetocaustin Warzen Stift nicht bei Alterswarzen (Verruca seborrhoica) verwenden

- Können in verschiedenen Größen und Farben auftreten
- Durchschnittlicher Umfang zwischen 0,5 und 1 cm
- Zu Beginn oft als hautfarbene, gelbbraune oder graubraune Flecken zu erkennen. Später werden sie größer und dicker
- Sie sehen aus, als lägen sie auf der Hautoberfläche und ließen sich leicht abkratzen, sind aber tatsächlich fest mit der Haut verbunden
- Sie können überall am Körper auftreten, außer an den Handflächen und Fußsohlen sowie an den Lippen. Am häufigsten treten sie auf der Brust, dem Rücken, dem Gesicht und dem Hals auf



Plantarwarze (Verruca plantaris)-

- Zu finden an der Unterseite/Sohle Ihres Fußes;
- Normalerweise flach und von rauer, verdickter Haut umgeben;
- Ähneln Schwielen;
- Können schwarze Punkte oder winzige Körner enthalten;



Gebrauchsanweisung (Verbrennungen vorbeugen):

DIESE DINGE BEACHTEN:

- Anwendung durch Erwachsene;
- Nur an Händen und Füßen verwenden! Das Produkt nicht auf anderen Körperteilen anwenden;
- Die umliegende Haut mit Vaseline oder Zinksalbe einreiben, um die Haut zu schützen;
- Behandeln Sie die Warze nur einmal pro Woche gemäß der Gebrauchsanweisung;
- Die Flüssigkeit nur mit der Warze in Kontakt kommen lassen;
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der gesunden Haut;
- Die Flüssigkeit nach dem Auftragen gut trocknen lassen;
- Die Warze nicht abdecken;
- Das Ergebnis ist nach 1 Woche sichtbar;
- Die Anwendung bei Kindern muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden;
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



MACHEN SIE DIESE DINGE NICHT:

- Das Produkt auf Warzen an anderen Körperteilen als Händen und Füßen auftragen;
- Das Produkt auf Warzen auftragen, die sich ganz oder teilweise unter einem Nagel befinden;
- Das Produkt auf Warzen auftragen, die ganz oder teilweise an den Fußsohlen auftreten (Plantarwarzen);
- Das Produkt auftragen, wenn Ihre Hände zittern oder Ihre Finger steif sind;
- Die Warze nach dem Auftragen der Flüssigkeit abdecken;
- Das Auftragen auf Muttermale, Wasserwarzen, offene Wunden, Hyperpigmentierung, Alterswarzen, Dornwarzen, dunkelhaarige oder seltsam aussehende Warzen;
- Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Die Behandlung häufiger als einmal pro Woche wiederholen.



⚠️ WARNUNGEN

Verwenden Sie den Acetocaustin Warzen Stift nicht:

- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Wenn Sie empfindlich auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagieren.
- Im Gesicht (die Flüssigkeit sollte niemals mit den Augen oder den Schleimhäuten von Nase oder Mund in Berührung kommen)
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Kontakt mit den Augen kann zur Erblindung führen
- Reiben oder berühren Sie die Augen nicht mit den Händen, wenn das Produkt an Ihnen haftet. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn das Produkt mit Ihren Augen in Kontakt kommt.
- Für Genitalwarzen oder im Genitalbereich
- Auf Muttermalen, Molluscum contagiosum, offenen Wunden, Muttermalen, Nävi, senilen (braunen) Warzen, Dornwarzen, dunkel gefärbten, haarigen oder seltsam aussehenden Warzen
- Bei roten, gereizten oder infizierten Warzen
- Unmittelbar nach einer chirurgischen Entfernung von Warzen, dem Einfrieren der Warze (Kryotherapie) oder einer Laserbehandlung. Dies gilt insbesondere, wenn die Haut nach der Behandlung gerötet ist oder schmerzt. Warten Sie in diesem Fall mindestens 4 Wochen, bis die Rötung oder Entzündung der Haut vollständig verschwunden ist. Erst danach können Sie den Acetocaustin Warzen Stift wieder verwenden
- Während der Schwangerschaft oder der Stillzeit
- Bei Warzen, die ganz oder teilweise unter einem Nagel auftreten
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Warzen, die ganz oder teilweise an der Fußsohle auftreten (Plantarwarzen).
- Bei Durchblutungsstörungen: Bei Diabetikern und Patienten mit Durchblutungsstörungen
- heilt der behandelte Bereich möglicherweise nicht so schnell und vollständig ab.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Anwendung des Acetocaustin Warzen Stiftes:

- Wenn Zweifel an der Diagnose bestehen (die Hautveränderung kann nicht eindeutig als Warze erklärt werden)
- Im Falle einer Immunschwäche (z.B. wenn Sie Zytostatika einnehmen)

In diesen Fällen dürfen Sie den Acetocaustin Warzen Stift erst nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden

⚠️ WARNUNGEN

- Nur für die äußere Anwendung bestimmt
- Mit äußerster Vorsicht verwenden. Die Flüssigkeit des Acetocaustin Warzen Stifts ist ätzend
- Wenn die gesunde Haut mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, spülen Sie sie bitte mit Wasser ab. Wenn die Haut trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen gereizt wird, muss sie der gleichen Behandlung unterzogen werden wie eine Verbrennung
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen
- Schließen Sie den Stift nach dem Gebrauch ordnungsgemäß und bewahren Sie ihn aufrecht stehend auf
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Die Verwendung durch Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten wird nicht empfohlen
- Kontakt mit Kleidung, Textilien, Tischtüchern oder der Haut vermeiden
- Bei Auftreten von Blasen die Anwendung abbrechen
- Behandeln Sie die Warze höchstens einmal und wiederholen Sie die Behandlung, nur wenn es nötig ist, nach einer Woche.
- Das Produkt sollte nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwendet werden.
- Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind sowohl auf dem Stift als auch auf der äußeren Verpackung angegeben.
- Verwenden Sie es nicht bei mehreren Personen, da es zu einer Kreuzkontamination des Virus kommen kann.
- Waschen Sie sich sofort nach der Anwendung die Hände (außer an der behandelten Stelle).
- Überprüfen Sie es vor jedem Gebrauch sorgfältig. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt erscheint. Entsorgen Sie es in diesem Fall.
- Aus einem beschädigten Produkt kann Flüssigkeit austreten.

NEBENWIRKUNGEN

Der Acetocaustin Warzen Stift kann Nebenwirkungen verursachen, die aber nicht bei allen auftreten. Die Nebenwirkungen, die bei der Behandlung mit dem Acetocaustin Warzen Stift auftreten können, sind Hautreizungen, Brennen, Hautrötungen oder Überempfindlichkeitsreaktionen. Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen sowie Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

WECHSELWIRKUNG VON MEDIKAMENTEN

Uns sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

INHALT DES ACETOCAUSTIN WARZEN STIFTS

Ein Stift gefüllt mit 3ml einer Mischung aus Monochloressigsäure (50 %), gereinigtes Wasser und Methylenblau.

LAGERUNG

Lagern Sie den Acetocaustin Warzen Stift bei einer Raumtemperatur von 15-25 °C im Originalbehälter und außerhalb der Reichweite von Kindern.

☞ Das Verfallsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung angegeben.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Für weitere Informationen über den Acetocaustin Warzen Stift besuchen Sie www.acetocaustin.de. Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Lieferanten.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren
	Symbol, das darauf hinweist, dass bei der Verwendung des Produkts Vorsicht geboten ist
	Symbol für das Verfallsdatum
	Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt
	Warnung: Ätzende Substanz
	Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden
	Symbol für die Chargennummer
	Das Produkt muss zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden
	Symbol für die eindeutige Produkterkennung

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DEN ACETOCAUSTIN WARZEN STIFT


(Anwendung nur durch Erwachsene):

Bitte wenden Sie den Acetocaustin Warzen Stift mit äußerster Sorgfalt an. Die Lösung ist ätzend. Seien Sie besonders vorsichtig beim Auftragen auf schwer zugänglichen Bereichen Ihrer Hände und Füße. Dies gilt insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder gestörter Feinmotorik (zitterige Hände, steife Finger).



1. Bevor Sie beginnen, schützen Sie die gesunde Haut um die Warze herum, indem Sie eine dicke Schicht Vaseline oder Zinksalbe auftragen.
2. Halten Sie den Acetocaustin-Stift in einer schrägen Position, als ob Sie schreiben würden. Drücken oder quetschen Sie den Stift nicht.
3. Setzen Sie die Spitze vorsichtig auf die Warze.
4. Tragen Sie die Lösung zweimal auf, beide Male für etwa 3 Sekunden (zählen Sie langsam: 21, 22, 23).
5. Achten Sie darauf, dass die Lösung nur auf die Warze und nicht auf die umliegende Haut aufgetragen wird.
6. Lassen Sie die Lösung nach dem Auftragen etwa 5 Minuten lang trocknen.
7. Entfernen Sie nach dem Trocknen vorsichtig die Vaseline oder Salbe um die Warze.
8. Verschließen Sie den Stift nach dem Gebrauch fest und bewahren Sie ihn sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Bedecken Sie die Warze nach der Anwendung nicht.
10. Behandeln Sie dieselbe Warze nicht öfter als einmal pro Woche.

Die Flüssigkeit benötigt eine Woche, um die oberste Schicht der Warze aufzulösen, sodass Sie nicht sofort nach der Anwendung ein Ergebnis sehen werden. Je nach Größe und Dicke der Warze kann es erforderlich sein, die Behandlung mit Acetocaustin Warzen Stift nach einer Woche zu wiederholen. Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt etwa 5 Wochen. Wiederholen Sie die Behandlung nicht innerhalb kürzerer Zeit als einer Woche.

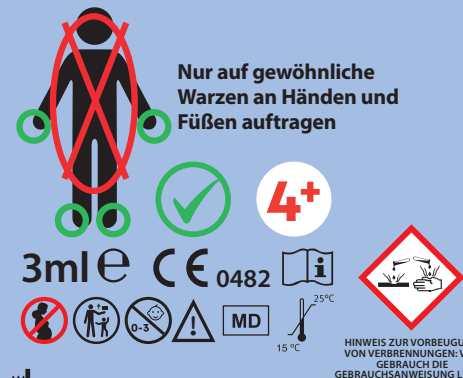

HERSTELLER/ LIEFERANT
TheOTClab B.V.
 Fred. Roeskestraat 115,
 1076 EE, Amsterdam
 Niederlande

HINWEIS ZUR VORBEUGUNG VON VERBENNUNGEN: VOR GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN!